



Hillrom™



Connecté au lit intelligent  
Hillrom® 900 Accella™

# SURFACE THÉRAPEUTIQUE ACCELLA™

Surface pour la gestion des soins de pression intégrée avec la thérapie I-mmersion™ et la gestion du microclimat Microclimate Management™ pour une meilleure protection contre les lésions cutanées

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La surface thérapeutique Accella Therapy, contrôlée grâce à l'interface graphique du soignant située sur les barrières latérales avec commandes intégrées, comprend la commande de remise à plat en une seule étape, la fonction Boost et fournit les thérapies permettant de prévenir et de traiter les escarres

Le dégonflage à commande unique permet un dégonflage rapide pour permettre la réanimation cardio pulmonaire

La fonctionnalité P-MAX permet un gonflage rapide et offre ainsi un repositionnement et un transfert simplifiés du patient

Le passage pour cassette radio intégré aide à réduire le repositionnement et l'inconfort au cours des procédures radiologiques portables

Les modes de thérapie par basse pression continue ou alternée offrent une flexibilité dans le traitement du patient

L'ajustement de la pression en temps réel grâce au capteur interne I-mmersion permet de régler la pression des cellules en fonction de la taille, de la morphologie, du poids ou de la position du patient dans le lit, sans intervention du soignant

La gestion du microclimat limite les effets de la chaleur et l'accumulation d'humidité

Les cinq zones basse pression indépendantes permettent une redistribution optimale de la pression

La zone spécifique aux talons à ultra-basse pression permet une protection optimale de la zone sensible des talons, avec soutien optimisé de la partie inférieure des jambes



## Surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy

La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy permet de prévenir et traiter les escarres chez les patients adultes présentant un risque faible à très élevé en luttant contre les facteurs de risques externes qui favorisent les lésions cutanées.


La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy, qui propose les modes basse pression continue ou basse pression alternée, offre une thérapie I-mmersion réelle afin d'atteindre et de maintenir les pressions d'interface les plus basses possible.

Dans les deux modes, le niveau précis de redistribution de la pression est continuellement et automatiquement contrôlé par le capteur interne I-mmersion qui régule la pression des cellules internes en fonction de la taille, du poids et de la position dans le lit de chaque patient.

Le système breveté MCM permet également de gérer le microclimat du patient et de réduire le risque de lésion tissulaire lié à une exposition excessive à la chaleur et/ou à l'humidité.



Surface contrôlée grâce à l'interface graphique du soignant sur le lit Hillrom 900 Accella

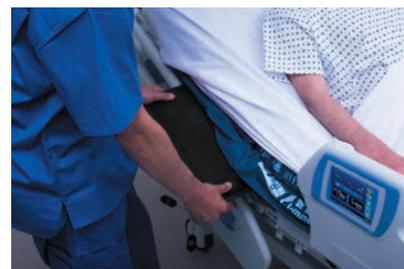

Compartment radiologique intégré



Branchement unique au lit Hillrom 900 Accella

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Charge maximale de sécurité</b>		250 kg
<b>Poids thérapeutique recommandé</b>		40 à 160 kg
<b>Matelas de remplacement</b>	Longueur	203 cm
	Largeur	92 cm
	Hauteur	21,5 cm
	Poids	17,5 kg
<b>Matériau de couverture</b>	Revêtement en polyuréthane sur matériau polyamide, fermeture éclair 360°, coutures renforcées, faible frottement, matière bi-extensible, perméable à la vapeur, bactériostatique, fongistatique et antimicrobien. Peut être essuyé et lavé.	
<b>Compartment radiologique</b>	Standard	

Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hillrom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

**hillrom.com**

Les avantages de ce dispositif sont la prévention et l'aide au traitement des escarres de phase I à IV. Il convient aux patients présentant un risque faible à très élevé d'escarres dans les limites de poids du patient recommandées entre 30 à 160 kg sur le matelas autonome et entre 40 et 160 kg sur la version combinée avec le lit Accella™ ou le lit Progressa™, afin d'atteindre des performances cliniques validées dans toutes les positions habituelles du relève-buste. Organisme notifié : GMED CE0459. Fabricant : Hillrom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.