




# Fonctionnement et technique de SureTemp® Plus

Modèles 692 et 690



## Orale

1. Vérifiez que la sonde avec le bouton d'éjection bleu et le puits de sonde bleu sont installés.
2. Retirez la sonde du puits de sonde.
3. Vérifiez que l'indicateur du mode oral est activé à l'écran (icône de tête clignotante).  Si cette icône ne clignote pas, appuyez sur le bouton de sélection du mode  jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
4. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.
5. Placez le bout de la sonde le plus profondément possible dans la poche sublinguale du patient (voir illustration).

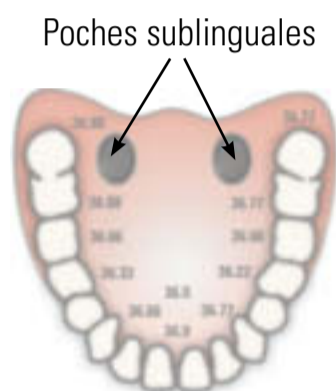



6. Ne demandez pas au patient de placer lui-même la sonde dans la bouche.
7. Tenez toujours la sonde en place en maintenant le contact avec les tissus jusqu'à ce que la température soit prise.

Les facteurs suivants risquent de fausser les prises de température au cours des 20 minutes suivant la fin de l'action en question.

- > Ingestion de liquides chauds ou froids
- > Brossage des dents
- > Aliments
- > Chewing gum ou bonbons
- > Cigarette
- > Activité telle que monter les escaliers ou courir.



## Axillaire adulte (patients âgés de 18 ans au moins)

1. Vérifiez que la sonde avec le bouton d'éjection bleu et le puits de sonde bleu sont installés.
2. Retirez la sonde du puits de sonde.
3. Appuyez sur le bouton de sélection de mode  et choisir le mode axillaire adulte.
4. Vérifiez que l'indicateur du mode axillaire adulte est activé à l'écran (icône axillaire clignotante). 
5. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.
6. Arrangez les vêtements pour exposer l'aisselle.
7. Évitez les plis dans les aisselles et placez le bout de la sonde verticalement aussi haut que possible (voir illustration).



8. Placez le bras du patient le long de son côté. Maintenez le bras du patient dans cette position sans permettre aucun mouvement du bras ou de la sonde pendant la prise de température.


## Axillaire pédiatrique (patients de 17 ans au plus) :


1. Vérifiez que la sonde avec le bouton d'éjection bleu et le puits de sonde bleu sont installés.
2. Retirez la sonde du puits de sonde.
3. Appuyez sur le bouton de sélection de mode  et choisir le mode axillaire pédiatrique.
4. Vérifiez que l'indicateur du mode axillaire pédiatrique est activé à l'écran (icône axillaire pédiatrique clignotante). 
5. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.
6. Arrangez les vêtements pour exposer l'aisselle.
7. Évitez les plis dans les aisselles et placez le bout de la sonde verticalement aussi haut que possible (voir illustration).



8. Placez le bras de l'enfant le long de son côté. Maintenez le bras du patient dans cette position sans permettre aucun mouvement du bras ou de la sonde pendant la prise de température.

## Rectale

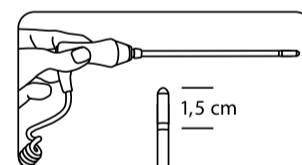

1. Vérifiez que la sonde avec le bouton d'éjection rouge et le puits de sonde rouge sont installés.
2. Retirez la sonde du puits de sonde.
3. Vérifiez que l'indicateur du mode rectal est activé à l'écran (icône du tronc inférieur clignotante). 
4. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn. Lubrifiez au besoin.
5. Séparez les fesses du patient et insérez doucement la sonde dans le rectum à environ 1,5 cm (moins pour les nourrissons et les enfants).



6. Tenez la sonde en place pendant la prise de la température.
7. Lavez-vous les mains.

## Monitormodus

Mode moniteur sur votre thermomètre. Prenez la température selon les instructions.

- > Maintenez la sonde en position lorsque la température s'affiche.
- > Appuyez sur le bouton de sélection du mode  jusqu'à ce que l'indicateur du mode  moniteur apparaisse sur l'écran
- > Continuez de prendre la température pendant trois minutes (orale ou rectale) ou pendant cinq minutes (axillaire).
- > La prise de température en continu à long terme n'est pas recommandée dans n'importe quel mode.

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™